



Bedienungsanleitung

Air Walker mit ROM AT53003 lang

Air Walker mit ROM AT53004 kurz



Hersteller:
ANTAR SpJ.,
03-068 Warszawa,
ul.Zawiślańska 43

Tel. 225183600
Fax 225183630
www.antar.net



Vorwort

Vielen Dank für den Erwerb dieses hochwertigen Medizinprodukts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam und genau durch. Beachten Sie stets die Hinweise und Anweisungen für einen sicheren Gebrauch. Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Patienten als Anwender des Produkts.

Verwendungszweck

Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position.

Lieferumfang

- Eine Orthese, Bedienungsanleitung.
Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produkts und sollte griffbereit aufbewahrt werden.
- Produktinformationen wie Modellname und Schuhgröße befinden sich auf dem Typenschild auf der Verpackung.

Indikation

Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie z.B.:

- präoperativ
- postoperativ
- posttraumatisch
- Spannungs- / stabile Frakturen des Unterschenkels
- Achillessehnenreparaturrehabilitation

Kontraindikation

Bei folgenden Erkrankungen darf die Orthese erst nach Rücksprache mit einem Arzt getragen werden:

- Ausgeprägte Neuropathie (Sensibilitätsverlust)
- Ausgeprägte Angiopathie (Durchblutungsstörungen)

Anwendungshinweise

- Überprüfen Sie die Orthese vor jeder Benutzung auf Unversehrtheit. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, ziehen Sie das Produkt sofort aus dem Verkehr und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
- Bei allergischen Reaktionen durch die erzeugte Wärme, sollte die Orthese abgenommen und der Arzt konsultiert werden.
- Eine falsch angelegte Orthese kann zu Druckstellen und dem Verlust der Fixierfunktion führen; beachten Sie die Anziehanleitung.
- Die Orthese sollte fest, aber nicht zu eng sitzen. Eine zu eng anliegende Orthese kann die Blutzirkulation einschränken. Eine zu locker anliegende Orthese führt zum Verlust der Fixierfunktion.
- Schließen Sie immer sämtliche Klettverbindungen. Das Offenlassen einzelner oder mehrerer Verschlüsse kann zu Stürzen führen und verringert den therapeutischen Nutzen.
- Das Produkt ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet und darf nur von einem Patienten verwendet werden.
- Die Orthese darf nicht auf offenen Wunden getragen werden.
- Halten Sie das Produkt von Flammen fern.
- Verzichten Sie auf das Führen von Kraftfahrzeugen, solange Sie die Orthesen tragen, die Ihre Fahrtüchtigkeit beeinflussen.
- Verwenden Sie gegebenenfalls eine Gehstütze, um die Gefahr von Stürzen zu vermindern und die Fußgelenke zu entlasten.

Air Walker mit Rom AT53003/04

Anziehen/ Ausziehen

Die Auswahl der richtigen Orthese sowie deren individuelle Anpassung ist wichtig für den Erfolg Ihrer Behandlung und sollte daher in Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt, Fachhändler oder qualifiziertem medizinischen Personal erfolgen.



1. Bei der ersten Anwendung die Gurte lösen und den Innenschuh vom Schuh entfernen.




2. Stellen Sie Ihren Fuß in die Schaumstoffeinlage in der Schale und drücken Sie diese an das Bein. Legen Sie die runde Lasche über den Fußrücken. Stellen Sie sicher, dass die Ferse eng in den hinteren Teil des Walkers passt.




3. Verschließen Sie nacheinander die Riemen mit den Klettverschlüssen am Fuß und Unterschenkel, so dass die Orthese bequem am Fuß sitzt. Achten Sie darauf, dass alle drei Riemen sorgfältig geschlossen sind.

Einstellen des Luftdrucks in der Kammer

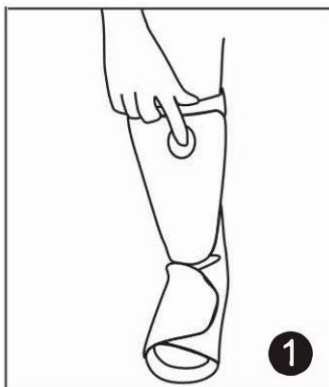

1. Drehen Sie zum Aufblasen den Knopf in die Position „Inflate“, drücken Sie dann mehrfach die Pumpe (roter Punkt), um die Kammer aufzublasen. Die Kammer soll Halt geben und sich bequem anfühlen.

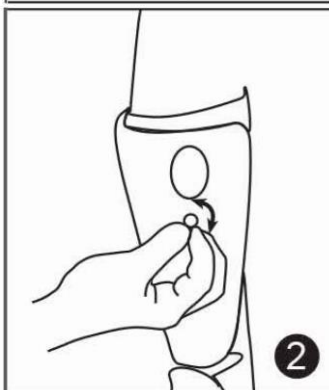

2. Sollte sich der Air Walker zu eng anfühlen, drehen Sie den Knopf in Richtung „Deflate“ um die Luft entweichen zu lassen. So gehen Sie auch vor, wenn Sie den Air Walker ausziehen möchten.

Einstellen des ROM's

Öffnen Sie den Schanierspalt und drehen Sie die Öffnung, um die Stifte freizulegen. Entfernen Sie die Stifte, wählen Sie die richtigen Einstellungen und setzen Sie die Stifte wieder ein. Schließen Sie die Kappe. Um im Winkel von 90 ° aufrecht zu stehen, setzen Sie beide Stifte auf 0 °. Um die Plantar- oder Dorsalflexion bei 7,5 °, 15 °, 22,5 °, 30 °, 37,5 ° oder 45 ° zu arretieren, setzen Sie einen Stift auf jedes Scharnier bei der gewünschten Einstellung an der Stelle, die mit "Lock" und den zweiten Stift mit der gleichen Gradeinstellung auf der gegenüberliegenden Seite. Wiederholen Sie den Vorgang für das Scharnier auf der anderen Seite des Walkers.

Produktmerkmale

- Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten
- Gurte mit regulierbaren Klettverschlüssen
- Selbsttragende Kunststoffschale mit Laufsohle
- Polsterung mit aufblasbarem Luftpolster

Nutzungsdauer

Die maximale Nutzungsdauer des Produkts ist abhängig von der jeweiligen Situation des Patienten. Die Dauer richtet sich nach der Indikation und dem Therapiezeitraum. Bei Beachtung der beiliegenden Reinigungs- und Pflegehinweise beträgt die maximale Nutzungsdauer 12 Monate. Nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer medizinischen Fachkraft können Sie das Produkt auch länger verwenden, solange es sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung entfernen Sie die Polster und Stoffe aus dem Kunststoffteil. Waschen Sie die Polster und Stoffe bei maximal 30 °C per Hand mit einer milden Seife. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach und lassen Sie die Polster und Stoffe an der Luft trocknen. Nicht im Trockner trocknen. Keine Bleichmittel verwenden und nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln und keinen direkten Wärmequellen aussetzen.



max. 30 °C



Die Kunststoffteile können mit einem feuchten Tuch unter Verwendung eines milden, haushaltsüblichen Reinigungsmittels abgewischt werden.

Vermeiden Sie aggressivere Reinigungsmittel wie Alkohol, Ammoniak, Lösungsmittel oder harte Bürsten.



Air Walker mit Rom AT53003/04

Wartungshinweise

Das Produkt ist wartungsfrei.

Technische Daten

Produkt:	Air Walker mit Rom AT53004
Farbe:	Schwarz
Höhe:	35 cm

Produkt:	Air Walker mit Rom AT53003
Farbe:	Schwarz
Höhe:	43 cm

Größentabelle

Air Walker Größe	Schuhgröße
XS	bis 35,5
S	36-39
M	40-44
L	44-46,5
XL	46,5+

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die lokalen Recyclingvorschriften. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.



Air Walker mit Rom AT53003/04

Garantieschein

Modell:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Stempel der Verkaufsstelle
und leserliche Unterschrift des Verkäufers:

1. AN TAR SpJ., 03·068 Warszawa, ul.Zawiśłańska 43, gewährt hiermit auf das Produkt eine 12monatige Garantie ab dem Tag der Übergabe des Produkts an den Käufer. Für Produkte, die von der polnischen staatlichen Krankenkasse NFZ erstattet werden, gilt eine verlängerte Garantiefrist, die der Hälfte der Nutzungsdauer entspricht, die in der Verordnung zu den garantierten Leistungen festgelegt ist, unter der Bedingung, dass die Nutzungsdauer in der Verordnung in Monaten bzw. in Jahren festgelegt wurde.
2. Während der Garantiefrist verpflichtet sich AN TAR, die notwendigen Reparaturen auszuführen, um das Produkt wieder funktionstüchtig zu machen, innerhalb von 14 Tagen ab Eingang des reklamierten Produkts.
3. AN TAR behält sich das Recht vor, das Produkt auszutauschen, falls angenommen werden muss, dass eine Reparatur unrentabel wäre.
4. Falls Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie es unverzüglich an die Adresse der Firma AN TAR (in Pkt. 1 angegeben) einsenden bzw. Ihre Verkaufsstelle kontaktieren.
5. Vor Ingebrauchnahme sollten Sie die Bedienungsanweisung lesen und sie genauestens einhalten. Zweckentfremdete Benutzung des Produkts hat den Verlust der Garantie zur Folge.
6. Der Garantie unterliegen keine Beschädigungen infolge von Durchbohren bzw. Durchschneiden mit einem scharfen Gegenstand, Beschädigung infolge mechanischer Kräfte von außen, infolge einer das in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Körpergewicht des Benutzers überschreitenden Belastung, Kontakt mit fettigen bzw. öligen Substanzen, Benzin.
7. DIESES GARANTIEDOKUMENT IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT EINEMKAUFNACHWEIS (KASSEN BON ODER RECHNUNG), BITTE FÜGEN SIE BEI REKLAMATION DEN KAUFNACHWEIS BEI. ZUR ANERKENNUNG DER VERLÄNGERTEN GARANTIEFRIST FÜR PRODUKTE, DEREN KAUF VON DER KRANKENKASSE NFZ ERSTATTET WURDE, IST ES NOTWENDIG, EINE KOPIE DES "AUFTRAGS FÜR DIE AUSSTATTUNG MIT MEDIZINPRODUKTEN, DIE ORTHOPÄDISCHE GEGENSTÄNDE UND HILFSMITTEL SIND", BEIZUFÜGEN."
8. Reklamationen ohne Kaufnachweis können nicht berücksichtigt werden.



Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Revision: November 16