

**AT51042**  
**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**WALKER**



**MD**

**CE**

**DE**

### **ALLGEMEINE HINWEISE**

Der klappbare Walker ist für Menschen mit Problemen der aufrechten Haltung, mit Erkrankungen des Bewegungsapparates oder Menschen mit Problemen beim Halten des Gleichgewichts beim Gehen konzipiert. Der Walker unterstützt den Benutzer und reduziert so das Risiko, umzukippen. Das Produkt funktioniert gut beim Laufen lernen oder nach Verletzungen.

### **AUSSTATTUNG**

- aus verstärktem Aluminium
- Ausgestattet mit 4-Zoll-Vorderlenkrädern und 4-Zoll-Hinterrädern
- einfach zu falten und zu transportieren, faltbar mit einem Knopf
- 8fach höhenverstellbar
- ergonomische PVC-Griffe

### **KONTRAINDIKATIONEN**

körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehbehinderung), die eine sichere Handhabung des Produkts verhindern.

### **WARNUNG**

- Bevor Sie den Walker verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf.
- Die Verwendung des Walkers auf unsicherem Untergrund, d.h. Nässe, Eis, Fett, stark geschliffen, ist aufgrund der Sturzgefahr inakzeptabel.
- Führen Sie vor jeder Verwendung eine Sichtprüfung aller Strukturelemente des Produkts durch, einschließlich der Stabilität und des Zustands des Tragrahmens.
- Der Walker ist nur für einen Benutzer geeignet und um sich darauf abzustützen.
- Es ist verboten, auf dem Walker zu stehen.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Höhe.
- Das maximale Benutzergewicht beträgt 110 kg.
- Verwenden Sie den Walker nicht, wenn sichtbare oder wahrnehmbare Schäden (z. B. Risse) vorhanden sind, da es in diesem Fall zu einem Unfall kommen kann.
- Lehnen Sie sich nicht seitwärts, dadurch besteht die Gefahr des Umkippens.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Flammen.

Im Falle eines "schwerwiegenden Vorfalls" im Zusammenhang mit einer Vorrichtung, die direkt oder indirekt zu einem der folgenden Ereignisse geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte:

- a) der Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person oder
- b) vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands des Patienten, Anwenders oder Dritter oder
- c) eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit;

Dieses "schwerwiegende Vorkommnis" ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist, zu melden.

Bei Schmerzen, allergischen Reaktionen oder anderen für den Anwender unklaren Störsymptomen im Zusammenhang mit der Verwendung eines Medizinprodukts sollte ein Arzt konsultiert werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu einem anderen Zweck als den dafür vorgesehenen.

Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Komponenten korrekt zusammgebaut wurden.

### **HINWEIS**

Während der Verwendung und Handhabung des Produkts sowie während des Falzens und der Einstellung der Mechanismen kann die Gefahr des Einklemmens und/oder Zusammendrückens der Körperteile des Benutzers/der Begleitperson in den Löchern/Lücken zwischen den Elementen bestehen. Diese Schritte sollten mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, stabilisieren Sie die Position, indem Sie die Muttern/Schrauben anziehen

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Vernachlässigung der Wartung, unzureichende Wartung oder durch Nichteinhaltung der Empfehlungen in diesem Handbuch verursacht werden.

#### **TECHNISCHE PARAMETER**

Höhe: 85-102.5cm, 8fache Verstellmöglichkeit (alle 2,5 cm)

Breite zwischen den Griffen: 42 cm

Breite: 63 cm

Gefaltete Breite: 12 cm

Länge: 48 cm

Verpackungsmaße: 56x12x75 cm

Vollstoffräder: 4"

Maximales Benutzergewicht: 110 kg

Gewicht: 3,75 kg

Gewicht mit Karton: 4,5 kg



**DIESES ZEICHEN GIBT DAS MAXIMALE GEWICHT DES BENUTZERS AN.**

#### **ENTFALTEN**

Um den Walker zu entfalten, ziehen Sie die Seiten des Walkers nach außen und montieren Sie dann die Beine auf die entsprechende Höhe.

#### **ZUSAMMENKLAPPEN**

Um den Walker zusammenzubauen, drücken Sie den Verriegelungsknopf, ziehen Sie die Seiten des Walkers hinein und falten Sie dann den Walker.

#### **BEWEGEN MIT DEM WALKER**

Sie sollten am Walker stehen und die Griffe mit beiden Händen halten, der Winkel der Beugung der Beine sollte dabei etwa 30° betragen. Um den Walker zu stoppen, sollte Druck mit dem Gewicht des Körpers auf die Griffe ausgeübt werden.

#### **PATIENTENZIELGRUPPE**

Der Angehörige der Gesundheitsberufe weist Erwachsene und Kinder in eigener Verantwortung auf die Verwendung des Produkts hin, wobei er die verfügbaren Varianten/Größen/erforderlichen Funktionen/Größen und Indikationen unter Berücksichtigung der vom Hersteller bereitgestellten Informationen berücksichtigt.

#### **REINIGUNG**

Das Produkt sollte regelmäßig mit Wasser und sanften Reinigungsmitteln gereinigt werden. Das Produkt kann behandelt werden mit Desinfektionsmittel. Achten Sie darauf, dass das Desinfektionsmittel keine korrosiven Chemikalien wie starke Säuren und Laugen enthält. Verwenden Sie keine groben Reinigungsgegenstände und starken Reinigungsmittel.

#### **LAGERUNG**

Wenn das Produkt nicht in Benutzung ist, sollte es in einem trockenen und kühlen Raum in der Originalverpackung gelagert werden. Vermeiden Sie feuchte Räume und längere Lagerung in direkter Sonneneinstrahlung.

#### **ENTSORGUNG DES PRODUKTS NACH DEM ENDE DER LEBENSDAUER**

Nachdem der Lebenszyklus des Geräts beendet ist, kann das Medizinprodukt als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden.

## GARANTIEKARTE

Modell: .....

Seriennummer: .....

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers .....

- 1) Antar Medizin GmbH, Döbelner Str. 7, 12627 Berlin, gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer.
- 2) Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.
- 3) Während der Garantiezeit verpflichtet sich AN TAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen. AN TAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Käufer.
- 4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverzüglich portofrei an die Adresse von AN TAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.
- 5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.
- 6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.
- 7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigelegt werden.
- 8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt.
- 9) Der Käufer hat im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer gesetzliche Rechte, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenüber diesen gesetzlichen Rechten enthält die Garantie ein zusätzliches Leistungsversprechen, das über die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.

ANTAR Sp. J.  
03-068 Warschau, Zawisłańska 43  
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30  
[www.antar.net](http://www.antar.net)



### Verteiler:

Antar Medizin GmbH  
Döbelner Str. 7, 12627 Berlin  
Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821  
E-Mail: [antarmedizin@antarmedizin.com](mailto:antarmedizin@antarmedizin.com)



Gebrauchsanweisungsversion: v1-27.01.2023  
Ausgabedatum der aktuellen Version der Gebrauchsanweisung 15.01.2023